



## Laboratório de Genética - Esc.Veterinária da UFMG

Av.Antônio Carlos 6627 31270-010 Belo Horizonte-MG


tel:(31)3409-2206 fax:(31)3491-3963 bloodlab@vet.ufmg.br

Credenciado no Ministério da Agricultura: Portarias 88/1992 e 105/2008

### INSTRUÇÕES DE USO

Coletar uma amostra de sangue para cada animal, em tubo com anticoagulante. IDENTIFICAR O TUBO COM O NOME e NÚMERO DE REGISTRO DO ANIMAL.

1. Antes de iniciar a coleta, puxe o êmbolo da seringa até ouvir um "click". O tubo já estará com vácuo criado.
2. A coleta de sangue é feita na veia jugular (veia do pescoço). Remover a tampa da agulha e puncionar a veia (NÃO remova a borrachinha verde da outra extremidade da agulha).
3. Empurre o tubo com vácuo (não o êmbolo) até o final para encaixá-lo na base da agulha. Gire o tubo no sentido horário para travar na agulha. Uma agulha oculta sob a borrachinha verde vai furar o tubo e o vácuo vai puxar o sangue. Retirar o tubo **quando estiver cheio**.
4. Caso você não tenha acertado a veia e tenha perdido o vácuo, empurre o êmbolo DEVAGAR, tomando cuidado para não perder o líquido (anticoagulante). Use o tubo como se fosse uma seringa comum.
5. Remova a agulha. Agite o tubo delicadamente e em seguida quebre o êmbolo (veja a figura).

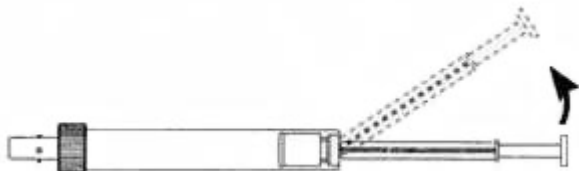

#### IMPORTANTE:

Use uma agulha para cada animal.